

FICHE TECHNIQUE

ANIMALINTEX

POSOLOGIE ET MODE D'UTILISATION

- Nettoyer soigneusement la zone à traiter
- Placer le rabat de l'Animalintex dans un bol peu profond, la surface plastifiée tournée vers l'extérieur.
- Verser de l'eau dans le récipient sur le pourtour de l'Animalintex
- Une fois qu'il a trempé dans l'eau, retirez le paquet de la bassine et éliminez l'excédent d'eau en exerçant une légère pression
- Appliquer la poche sur la zone affectée, la surface plastifiée vers l'extérieur (sans contact avec la peau), en la modelant sur les bords de la zone d'application
- Appliquer un bandage de contention externe, en veillant à ce que l'enveloppe soit entièrement recouverte



EMBALLAGE

Une enveloppe contient 1 couches

Une boîte contient 10 couches

DESCRIPTION

Paquet multicouche très absorbant, facile à utiliser et adapté à un large éventail de problèmes courants chez le cheval.

- *Enveloppe chaude*: abrasions, ecchymoses, plaies contaminées et infectées, abcès
- *Enveloppe froide*: tendinite, desmite, shine, traumatisme

CODE PRODUIT

EAN13: 5010058057043

